

取扱説明書

この度は、Fast Whiteをお買い上げいただきましてありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。また、本書はいつもお手元においてご使用下さい。

Fast Whiteは、安全で確実な効果を米国の専門医が認めたホワイトニングシステムです。

Fast Whiteに含まれる過酸化物は、米国の専門歯科医が推奨しています。

ホワイトニングとは、変色したり着色してしまった歯を削ることなく輝く白い歯にするシステムです。

ご自宅で手軽に何度でも行うことができます。

Fast Whiteは、安全で有効な成分の働きにより、1日30分5日間の使用で歯を白く輝かせます。

ホワイトニングの結果は、変色の性質・着色の成分により個人差があります。

テトラサイクリン等の頑固な汚れの結果、変色・着色している場合は、歯科医の診断を受けた上でホワイトニングを行ってください。

【商品の内容と各部の名称】
商品をご確認下さい。



ホワイトニング Q&A

!ホワイトニングって何ですか？
クリーニングやブリーチングとの違いは？

ホワイトニングとは、本来の自分の歯の色をホワイトニング成分の働きにより、更に明るく漂白することです。海外ではブリーチングという表現をすることも同じ意味です。

クリーニングとは、本来の自分の歯の色を取り戻すため、歯の表面についている汚れや歯石を取り除く方法です。

アジア人黄色人種は、欧米人白人種に比べ、歯も黄色味かかっています。毎日清潔に磨いていても、白く輝く歯にはなりにくいです。

*効果はどれくらい持続しますか？

個人差があります。

それは歯の着色の原因となるものが タバコ・カフェイン・お茶・ワイン・ジュース等 摂取量に個人差があるものが多いからです。

発育期の抗生物質服用の副作用・フッ素による変色という原因の場合、一度のホワイトニングで得た白さは長持ちします。

一度のホワイトニングで輝く白さを手に入れても、それが生涯続くわけではありませんが、その白さを維持する心がけを持ち生活習慣や正しいお手入れでかなり長持ちします。

Fast Whiteは、再度ご使用いただくことも可能です。白さに満足がいけない方、再び着色が気になる方には、最初の5日間が終了し1ヶ月程経過してから再度5日間のホワイトニングをお薦めします。

#どれくらいの期間で歯が白くなりますか？

一日目から、ほとんどの方が白さを実感していただけることと思います。

Fast Whiteのホワイトニングシステムは、1日30分5日間で、ご満足いただける白さ輝きになります。尚、60分以上の装着や就寝時のご使用はおやめください。

\$ホワイトニングは安全ですか？

はい。Fast Whiteのホワイトニングに関しては多くの研究と臨床実績があります。正しくご使用いただければ、ホワイトニングジェルの成分・トレイのゴム素材について人体に悪影響を及ぼす恐れはありません。

アメリカ国内では歯科医院のみならず、ドラッグストアでも販売が許可され多くの人達が使用しています。アメリカ以外のヨーロッパ各国にも販売が広がっています。

特別な疾患のない方にとっては、歯・治療跡・歯肉に悪影響を及ぼす心配なく安全に使用していただけます。

%副作用はありませんか？

通常、ホワイトニングジェルに知覚過敏が起こることが多いです。歯や歯肉にしみるような感覚があります。しかし、髪のカラーリングの際、皮膚の弱い方が最初少ししみるけれど、かぶれたり炎症を起す人はごくまれであるように、歯や歯肉にしみる感覚も次第に減少し消えていきます。5分以上知覚過敏が収まらない、もしくは痛みが増すような場合は直ちに中断すると症状は消えていきます。その場合は歯科医師の診察をお受けください。

&どんな人でも使用は可能ですか？


Fast Whiteは多くの臨床実績がありますが、妊娠中の方・授乳中の方ではテストを行っておりません。よってご使用はおやめください。また14歳未満のお子様についてもご使用はおやめくださいますようお願いいたします。

現在歯科治療中の方にもご使用はお薦めしておりません。治療終了後は歯や治療跡に悪影響を及ぼす心配はありません。

知覚過敏の方は、程度によりFast White専用歯磨き粉の使用により感覚が和らぐ方もあります。使用前に不安のある方は歯科医院へご相談ください。

STEP1 【ホワイトニングの流れ】


!トレイを作成する
初めてお使いになる時は裏面の【ジャストフィットするマウストレイの作り方】をよく読んであなたの口にあった専用トレイをお作りください。

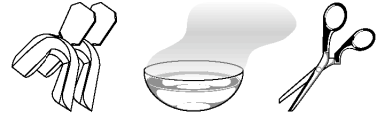

*専用歯磨き粉で歯を清潔にする
ホワイトニングジェルの効果を高めるためにも専用歯磨き粉で磨いてください。






#ホワイトニング
トレイにジェルを流し入れ30～60分5日間繰り返す
はじめてお使いになる時は【ホワイトニングの方法】をよく読んでください。

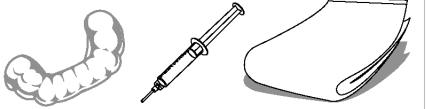

さていよいよFast Whiteを使っていただきますが、ご使用前に以下の物をご用意ください。

マウストレイを作る時に必要な物

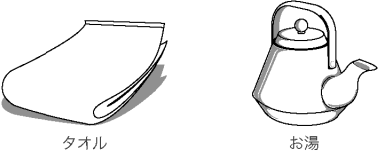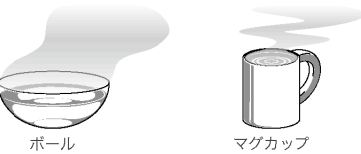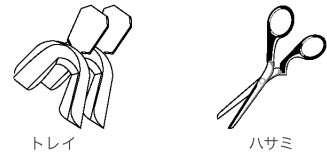

ホワイトニングをする時に必要な物

